

ENURAD[®] 400



En handledning för mottagningen

ENURAD[®] AB

Instruktion och handhavande av ENURAD[®]400 larmet på mottagningen.

Vid nyleverans:

Leveransen består av följande:

| | |
|-------------------------|----|
| Väckarklocka | 1 |
| Nätadapter | 1 |
| Fuktavkännare | 1 |
| Handhavande instruktion | 1 |
| Trosskydd | 10 |
| Förvaringskartong | 1 |

Provning av utrustning:

Sätt nätadapterns runda sladdkontakt i väckarklockan.

Sätt adaptern i ett vägguttag.

Iakttag sekundvisaren för att se att klockan fungerar. Om inte, kontrollera att batteriet sitter i riktigt (**OBS! batteriet behövs även för att larmets ringsignal skall fungera**).

Släpp upp knappen på klockan, klockan ringer två gånger som funktionskontroll.

Klockan är nu redo att larma, i fall en signal från fuktavkännaren kommer.

Fukta ett finger med saliv och tryck fingret mot fuktavkännarens metall sida.

Detta aktiverar fuktavkännaren som sänder en signal till klockan,

Klockan skall nu börja ringa. Den fortsätter tills knappen (på klockan) trycks ned.

Torka av fuktavkännaren lite lätt.

Prova hur långt ifrån klockan fuktavkännaren fungerar:

Anslut nätadaptern till väckarklockan som vanligt, sätt adaptern i vägguttaget.

Ta fuktavkännaren och gå 5 – 8 meter ifrån klockan, men bara så långt att du fortfarande hör klockans ringsignal.

Fukta fuktavkännaren. Börjar klockan ringa direkt kan du öka avståndet.

Ringer klockan inte, gå då med raska steg mot klockan tills den börjar ringa.

Tänk på att fuktavkännaren bara sänder under ca 3 sek.

Ringer den inte vid första försöket, gå lite närmare och försök igen.

Torka av fuktavkännaren emellanåt.

Normalt skall väckarklockan placeras så långt från sängen att patienten inte kan nå den utan att resa sig, så att det maximala avståndet blir 1 till 3 meter.

När fuktavkännaren blir fuktig aktiveras den för ca 3 sekunder. Har man fuktat den lite lätt och torkat av den efter provet (ca 10 till 20 sekunder) så kan man starta den på nytt.

Är den däremot fuktig, så har den stängts av efter 3 sekunder och går först att starta igen efter den har varit torr i minst 5 sekunder.

Vi rekommenderar av hygieniska skäl, att ni använder en fuktavkännare per patient.

Observera!

Radiovågor som fuktavkännaren skickar i väg kan störas, särskilt av datorer, trådlösa -termometrar, -hörlurar och -inbrottslarm samt "Finess telefoner.

Sensorn tål inte att tvättas i disk/tvättmaskin!

Utlämning av ENURAD[®]400 till patienten.

(Visa för både, patienten och föräldrar)

Tag fram ENURAD[®]400 Larmet. Öppna kartongen och visa hur de olika delar är placerade i kartongen. Ta ut väckarklockan och nätadaptern. Visa hur man koppla ihop adaptern och väckarklockan. Sätt nätadaptern i ett vägguttag. (Strömmen på den runda kontakten som sätts i klockan har en spänning av 9 volt och är ofarlig att ta i)

Visa att klockan fungera som en vanlig klocka och att man ställer in tiden med ställskruven på baksidan. Förklara att väckningsfunktionen har kopplats bort så att den inte larmar för fel sak.

Knappen på klockan är till för att sätta på och stänga av larmet.

Uppsläppt knapp innebär att larmet är "på " och nedtryckt betyder att larmet är avstängt.

Släpp upp knappen. Klockan ringer två gånger som kontroll.

Förklara att det finns en liten radiosändare i fuktavkännaren och att den sätts i gång så snart det blir fuktigt mellan metalltyterna.

Låt patienten fukta ett finger och peka med den mot metallsidan av fuktavkännaren.

Ringklockan skall då börja ringa.

Tryck ned knappen på klockan så att den slutar ringa.

Förklara att detsamma händer när man kissar på fuktavkännaren.

Ta fram ett trosskydd och förklara hur fuktavkännaren placeras i den och hur trosskyddet klistras fast i ett par **tätt åtsittande** trosor/kalsonger. Visa att den skall sitta så nära urinöppningen som möjligt. Trosskydden kan köpas på Apotek eller i dagligvaruhandeln.

Tänk på att väckarklockan skall stå så långt ifrån sängen att patienten måste stå up för att stänga av larmet.

För att komma ihåg alla instruktioner, finns en instruktion:

"Användning av ENURAD[®]400"

Påminn föräldrarna om att utrustningen de får låna bör behandlas varsamt.

Fuktavkännaren skall inte utsättas för länge för urin, eftersom det är mycket aggressivt mot dess metalltytor. Fuktavkännaren skall sköljas av med ljummet vatten och lite tvål, borsta gärna lite varsamt med en mjuk hand- eller tandborsta och torka den sedan.

Påpeka särskilt att om fuktavkännaren har suttit kvar i kalsongerna och åkt med in i tvätten är den förstörd.

Gör föräldrarna även uppmärksamma på att de har hänt några gånger att barnen har gått på WC, dragit ner byxorna och därvid tappat fuktavkännaren i WC'n och spolat ner den.

Gör därför bara ett snitt som öppning i trosskyddet.

Som tillverkare av elektronik har vi åtagit oss att ta tillbaka de av oss tillverkade utrustningar efter användning. Så, om ni vill hjälpa till med att värna om miljön, sänd tillbaka använda fuktavkännare till oss, så tar vi hand om destruktionsen.

Och allra sist:

Den viktigaste delen av behandlingen är att ”patienten”
sköter detta alldeles själv..

Om det inte fungerar:

A) KONTROLLERA BATTERIET I VÄCKARKLOCKAN.

B) KONTROLLERA FUKTAVKÄNNARENS METALL YTA.

Det är viktigt att metallytan på fuktavkännaren rengörs efter varje användning. Ta en gammal tandborste och lite tvål och rengör under rinnande ljumt vatten, glöm ej att torka efteråt.

Dessa trosskydd rekommenderar vi, de finns på apoteket.



Så klipps trosskyddet upp och sensorn placeras i den



ENURAD® AB
Östra Trädal 310
SE 442 94 YTTERBY

Phone: ... 0303 58400

Email: info@enurad.com

Homepage: www.enurad.com